

Brugsvejledning til Furines Klæbende Barrierefilm

Beskrivelse:

- **Klæbende Barrierefilm** er en silikonebaseret, hudvenlig, filmdannende væske, der er udviklet til at understøtte fastsiddningen af Furines klæbende produkter på huden. **Klæbende Barrierefilm** danner en beskyttende film på huden, der hjælper med at huden holdes intakt under brug af Furines produkter. **Klæbende Barrierefilm** påsmøres huden inden Furines klæbende produkt påsættes.

Indikationer:

- **Klæbende Barrierefilm** er indikeret til at understøtte fastsiddningen af Furines klæbende produkter, som for eksempel Eksternt Fækalt Kateter, på huden.
- **Klæbende Barrierefilm** er indikeret til at beskytte huden på patienter med sivende afføring.

Kontraindikationer:

- Furines **Klæbende Barrierefilm** bør ikke bruges, hvis man har allergi over for indholdsstoffet.
- Furines **Klæbende Barrierefilm** bør ikke bruges på brudt hud eller åbne sår.


Indeholder Siloxaner

Applikationsguide

- Inden påsmøring af **Klæbende Barrierefilm** skal huden være ren og tør, og fri for olie, fedt eller cremer. Huden klargøres bedst ved brug af Furines **Medical Skin Wipe**, der fjerner overskydende olie og fedtstof fra huden.
- Ved hjælp af applikator swap'en, smøres et tyndt lag **Klæbende Barrierefilm** på huden, der, hvor det klæbende produkt skal påsættes.
- **NB.** Man bør **kun** bruge **Klæbende Barrierefilm** i forbindelse med påsætning af Furines produkter. Man bør ikke erstatte **Klæbende Barrierefilm** med andre klæbere eller film.
- **Klæbende Barrierefilm** skal tørre i ca. 60 sekunder, inden det klæbende produkt sættes på. Sørg for at trykke produktet fast på hele den klæbende flade.



Læs først
brugsvejledningen

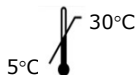

Single
Use



Se på
pakken



Se på
pakken

REF B20DK10



Furine ApS
Industrivænget 1
3320 Skævinge
Danmark

IFU version DK-1.1



Furine